

# RT.2 クイックリファレンスメニュー 表



初めてお使いの方へ

まずはそのままの設定でRT.2をお試し下さい。  
工場出荷状態では、RT.2のアシスト制御を体感して頂きやすい設定となっております。

○工場出荷状態○

「アシスト」「ブレーキ」 → 4段階中の3番目の強さ（1番強い設定より1段階弱い）  
「速度」 → 4段階中の3番目の上限速度設定  
（1番速い設定より1段階弱い、4.5km/hの上限設定）

## アシスト

設定変更の方法

電源  
On

設定ボタンを  
2秒以上  
長押し



点滅

電源ボタンを  
短押しで  
値（1～4）変更

設定ボタンを  
2秒以上長押し  
完了

## ブレーキの

設定変更の方法

設定ボタンを短押し



点滅

電源ボタンを  
短押しで  
値（1～4）変更

設定ボタンを  
2秒以上長押し  
完了

## 速度の

設定変更の方法

設定ボタンを短押し



点滅

電源ボタンを  
短押しで  
値（1～4）変更

設定ボタンを  
2秒以上長押し  
完了

「速度」では上限速度を設定出来ます。

速度1・・・1.5km/h

速度2・・・3.0km/h

速度3・・・4.5km/h

速度4・・・6.0km/h

設定した制限速度以上の「速度」

もしくは「加速度」を感知した時に

自動でブレーキがかかります。

※アシスト、ブレーキ、速度の設定は電源を切ったり、  
バッテリーを外しても設定情報が本体のメモリ内に残る  
ため、使用される度に設定する必要はありません。

設定中のLEDの  
表示パターン

1:

2:

3:

4:

弱い 遅い

ブ  
ア  
レ  
ス  
キ  
強

遅い

速  
度

速  
い

Play Movie


アシスト・ブレーキ・速度の  
設定を行う方法

QRコード



## 音量の変更方法

工場出荷時の音量は8段階中の6段階目の大きさです。音声オフにも設定可能です。

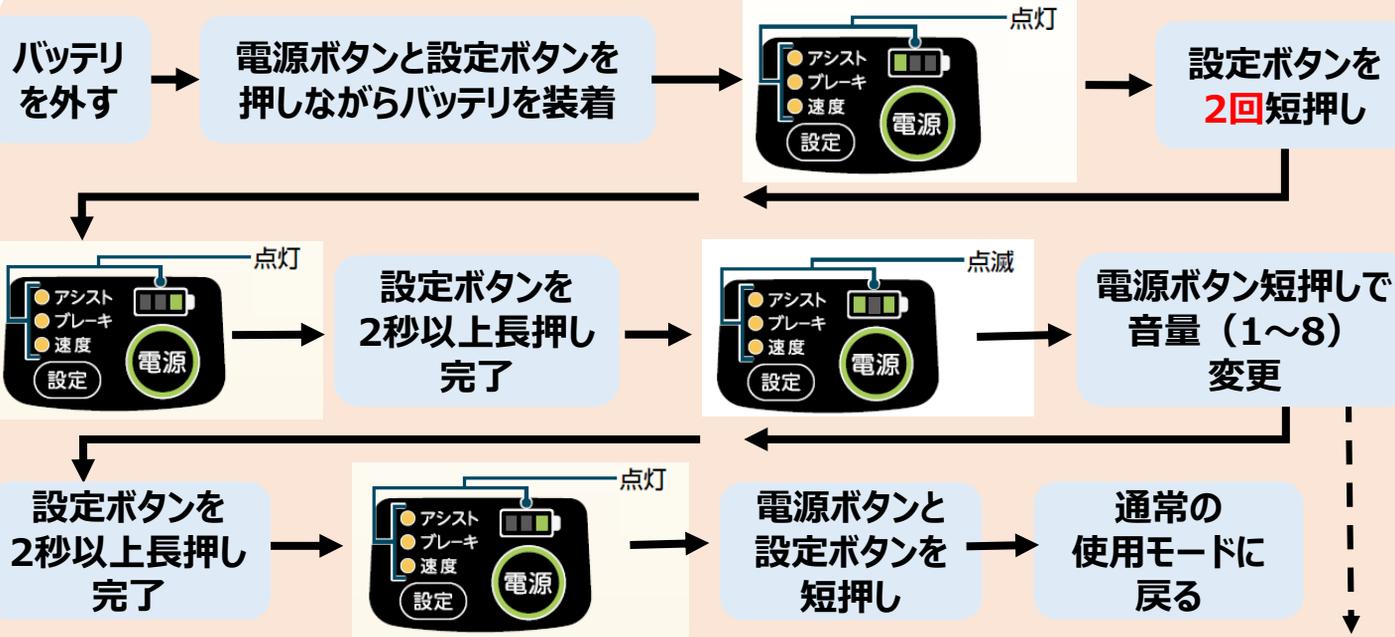

- ・【電源】を短く押すたびに音量が1段階大きくなります。第8段階のときに【電源】を短く押すと、第1段階に戻ります。(1が消音、8が最大音量です)
- ・音量を切り換えるたびに、その音量で音が鳴ります。



- ※音量の設定は電源を切ったりバッテリーを外しても設定情報が本体のメモリに残ります。
- ※本体が転倒した際は、音量Offでも転倒のお知らせメッセージが最大音量で流れます。


Play Movie

音量を調整する方法



## 自己診断機能の方法

センサーやモータに故障がないか簡単にチェック出来ます。お客様宅での点検時、出荷前の確認時などでご活用いただける非常に便利な機能です。なお、ブレーキ等の調整終了後に実施して下さい。

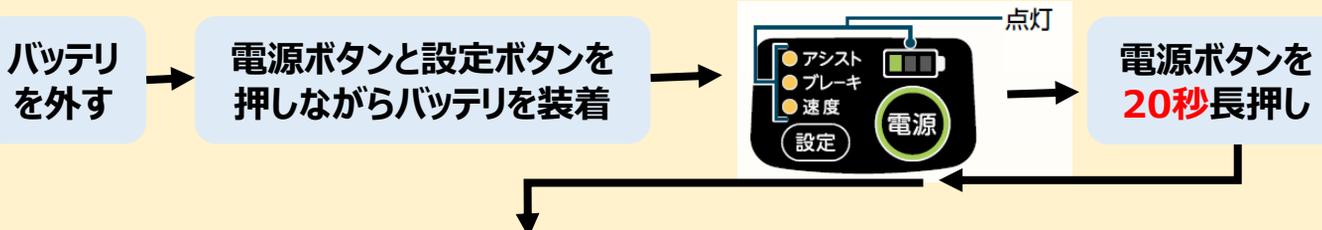

その後は音声ガイダンスに従い操作を行って下さい

- ※必ず担当者が立会の元、水平な場所にて実施して下さい。
- ※実施の際には、必ず上記の手順(LEDの点灯位置)をご確認の上、実行して下さい。上記と異なる状態で電源ボタンを20秒間押しと、意図しない調整機能が実行されて正常に動作しなくなり、再度工場での調整が必要となります。

Play Movie

自己診断機能による車体状況の確認方法